



SHOCK-ABSORBING
TECHNOLOGY



SWISS  MADE

PLANTARI ERGOPRO AC+




PREMESSA

PROPRIETÀ DELLA TECNOLOGIA NOENE®



Il materiale Noene® ha una **proprietà fondamentale**:

ASSORBIRE e **DISPERDERE** fino al 92% delle **VIBRAZIONI** derivanti dalle energie negative (di ritorno) provocate dall'**IMPATTO PIEDE-SCARPA-SUOLO**.

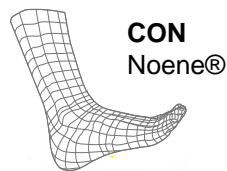

Questa funzione ha degli **evidenti benefici** sul corpo umano:

Bloccando tali vibrazioni, **PREVIENE** la formazione dei **MICROTRAUMI** che sono la causa dei **DOLORI** e delle **INFIAMMAZIONI** alle **articolazioni**, **schiena** e **cervicale**. Problemi di cui soffre la maggior parte della popolazione, proprio perché trascurati alla fonte.

NESSUN ALTRO MATERIALE AL MONDO È IN GRADO DI FARE QUELLO CHE FA IL NOENE®

Le **solette high-tech Noene®** devono quindi le loro straordinarie proprietà, e i **benefici** connessi, a questo materiale unico nel suo genere. Sono tra l'altro riconosciute come **Dispositivo Medico di Classe 1** dal **Ministero della Salute**.

PREMESSA

IMPORTANTE

TUTTI I MODELLI DI SOLETTE HIGH-TECH NOENE® OFFRONO GLI **STESSI BENEFICI**,
QUESTO PERCHÈ SONO TUTTI REALIZZATI CON IL RIVOLUZIONARIO **MATERIALE ANTIVIBRAZIONI NOENE®**



Da cosa dipende la scelta del modello più adatto a te?

TIPO DI SCARPE UTILIZZATE

(sportive, eleganti, sneakers)

USO DI UN PLANTARE ORTOPEDICO

(SI – NO)

CONTESTO D'USO

(lavoro, sport, tempo libero)

PLANTARI ErgoPro AC+

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ergonomici e leggeri
- Lavabili e riutilizzabili



*36 = 23,3 cm | 37 = 23,9 cm | 38 = 24,6 cm | 39 = 25,4 cm | 40 = 25,9 cm | 41 = 26,6 cm | 42 = 27,2 cm | 43 = 27,9 cm
| 44 = 28,6 cm | 45 = 29,3 cm | 46 = 30,0 cm | 47 = 30,6 cm | 48 = 31,5 cm

PLANTARI ErgoPro AC+

I **plantari ErgoPro AC+** sono indicati sia per lo **sport (in particolare per la corsa)**, per coloro che desiderano proteggersi in maniera completa durante gli allenamenti e le gare, che per le **camminate sportive (fit e north-walking)** al fine di ottenere un **comfort superiore** per i propri piedi* e minore affaticamento delle articolazioni.

BENEFICI



MATERIALI E BENEFICI

NOENE®: strategicamente posizionato nell'area del tallone e del metatarso per assorbire e disperdere gli shock

SCHIUMA SINTETICA A MEMORIA: offre un eccellente confort

TECHNO FABRIC: tessuto tecnico traspirante che aiuta a prevenire la formazione di batteri e funghi

GOCCIA METATARSALE: distribuisce ad ogni passo la pressione dell'appoggio nella parte centrale del piede

ARCO DI SUPPORTO: aiuta a correggere la postura ed allinea le giunture nelle articolazioni

PLANTARI ErgoPro AC+

MODALITÀ D'USO



APPLICAZIONE

I plantari ErgoPro AC+ devono essere inseriti **in sostituzione delle solette estraibili**. Il loro utilizzo è consigliato in scarpe con postura neutra. Questo, per evitare che alterino l'appoggio di una scarpa già modificata.

Da indossare unitamente alle calze, come richiesto dalla certificazione Dispositivo Medico di classe 1.

QUANDO SCEGLIERE I PLANTARI ErgoPro AC+

È consigliato scegliere questo modello **quando l'utilizzatore non soffre di problematiche specifiche** per le quali abbia già dei plantari personalizzati* o scarpe con soles strutturate a durezza variabile* o solette ergonomiche di spessore differenziato*; avverrebbe una modifica nella postura della scarpa con possibili effetti negativi.

*In questo caso, utilizzare sempre il modello Invisible SP01 da inserire sotto le solette originali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SITO WEB www.noene-italia.com

EMAIL info@noene-italia.com

ACQUISTA ORA I TUOI PLANTARI ERGOPRO-AC+

